


VERBINDINGSTYPE B

Deze verbinding is geschikt voor de meeste rolstoelen met rechte, schuine, gesloten of inklapbare vaste frames en met vaste of hefbare voetsteunen.

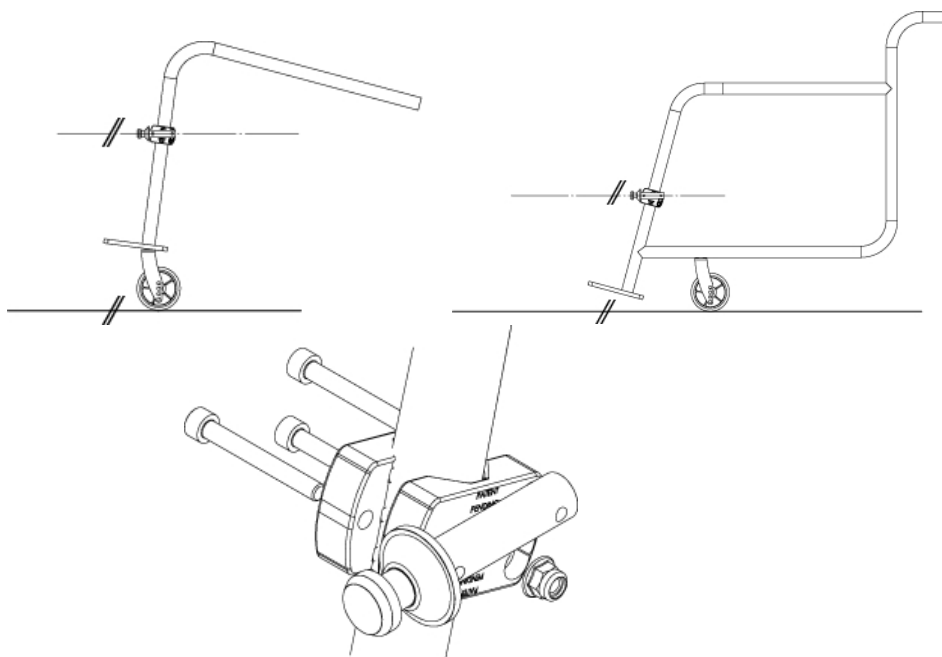

Hieronder een lijst met de meest voorkomende rolstoelen die compatibel zijn met type B-aansluiting:

Progeo	Ego	Kushall	K serie
	Joker / Joker V		Compact/Compact 2.0
	Joker-energie		Kampioen
	Grappenmaker R2	Aria	2.0
	Tekna Advance		Speciale
	Yoga		Ultra
OffCarr	Fenice	Panthera	S / U / X
	Althea	Ki Mobiliteit	Tsunami
	Diva		Schurk
	Venus	Moretti	Atmos
	Eos	Vermeiren	Trigo
	Halley	Per4Max	Skye
	Quasar	Vassilli	Evolutie Activa Compact
	Vega	RGK	Sub 4
	Themis	Talart JT	JT Ultimate
Ottobock	Avantgarde DV	Bodytech	Aero X
	Zenit	Permobil	Ti Lite Zr
Quikie	Xenon2		
	Argon		
	Helium		
	Nitrum		



Opmerking: de lijst wordt voortdurend bijgewerkt

TECHNISCHE ONDERSTEUNING: Eng. Alexander Troncone +39 3282177608

Geleverd materiaal

CODE	BEELD	BEDRAG	OPMERKINGEN
Universele klem 1012-26-007		2	
Universele klemadapters		2	De maat varieert afhankelijk van de vorm van de rolstoelbuis
Conische pin RTE-1006(56)		2	
Schroeven M6		6	De lengte varieert afhankelijk van de grootte van de rolstoelslang
M6 zelfborgende flensmoeren		2	
Afdekkingen voor moeren		2	

Montage
Aansluiting tipo B

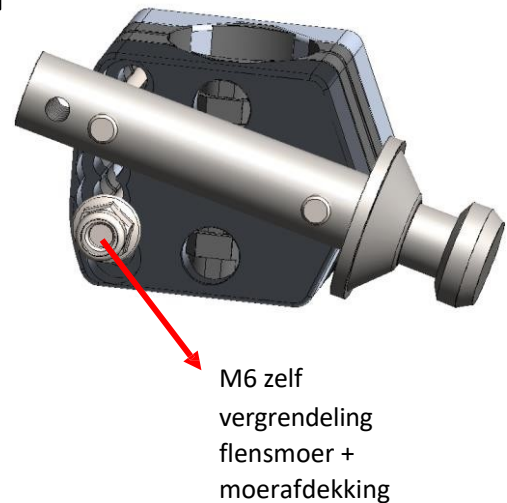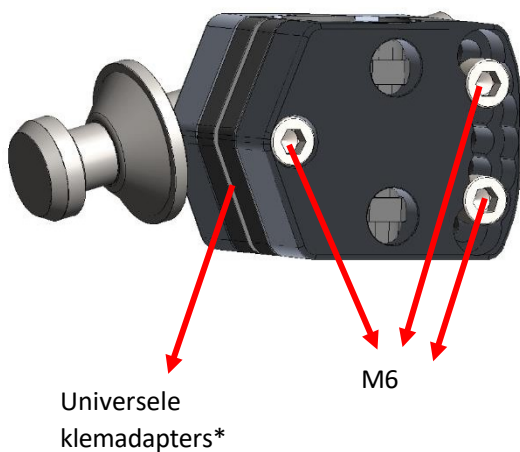


Montagehandleiding

	Wielmaat	Wapencode	Afbeelding	Montagehoogte conische penas (H)	Type standaard	foto
☐	EP3 12"/10"	Verhoogd 1012-128-000		33^{+0}_{-1} cm	Vast	
☐	EP3 14"/14,5"	Recht 1012-147-000		33^{+0}_{-1} cm	Vast	
☐	EP3 16"	Verlaagd 1012-147-000		33^{+0}_{-1} cm	Vast	


1. Voor een optimale configuratie: pas de helling van het stuur aan zodat het parallel loopt met het grondvlak



2. Stel de parkeerremmen van de rolstoel in en plaats de stuwraket voor de rolstoel met het wiel in het midden van de rolstoel.

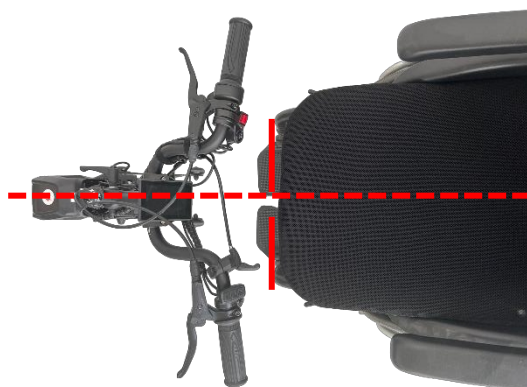

3. Plaats elke arm in de schacht, naar boven of naar beneden gericht, afhankelijk van het EP3 model, en pas de breedte van de armen tijdelijk aan de breedte van de rolstoel aan zonder de schroeven op de schacht vast te draaien.

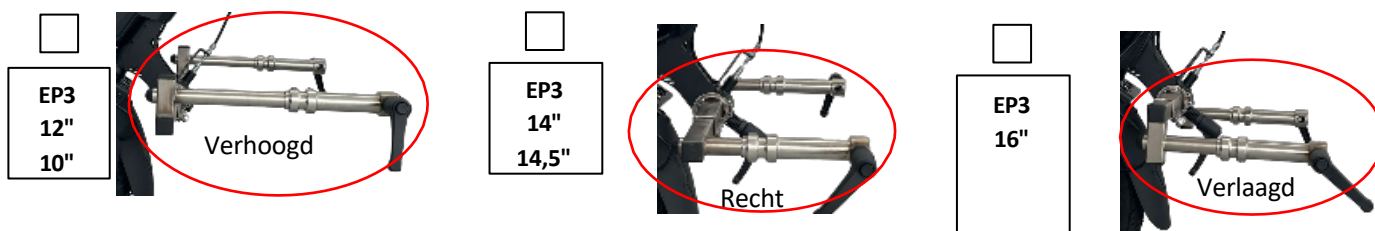



LET OP VOER DE VOLGENDE HANDELINGEN ÉÉN KANT TEGELIJK UIT

KANT 1


4. Plaats de universele klem met eventuele universele klemadapters op het punt van het frame dat is aangegeven in de afbeelding.




5. Monteer de conische pen alleen in het eerste gat (Fig. 5a) zodat de punt zich op de hoogte H bevindt zoals aangegeven in de vorige tabel; corrigeer de hoogtetolerantie H door de conische pen perfect af te stemmen op de diepte-insteller (Fig. 5b).

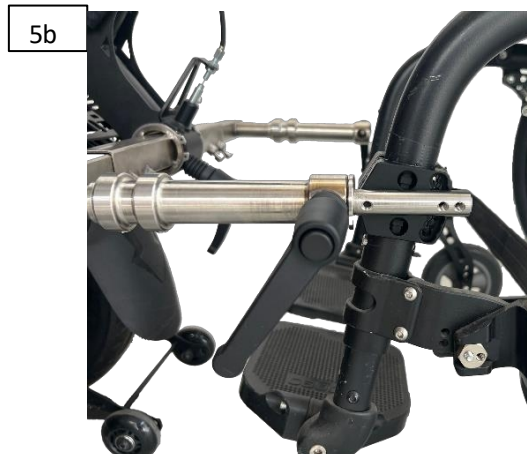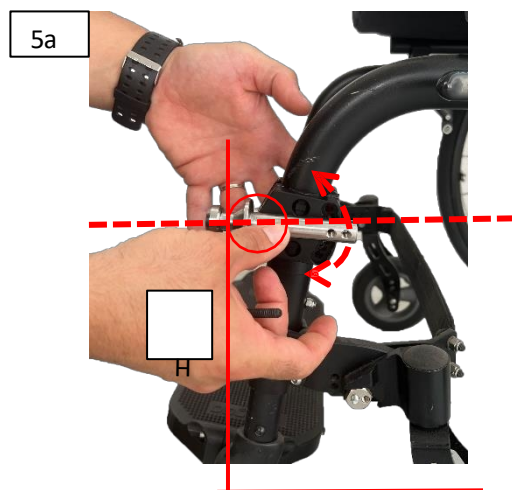

6. Zet de conische pen lichtjes vast door op de laterale spanhendel te drukken (fig. 6a). Draai de borgschroeven van de armen op de as lichtjes aan (fig. 6b); door het aandraaien kantelen de armen lichtjes naar boven, waardoor de conische pen een andere helling krijgt en in de optimale positie komt te staan (fig. 6c).

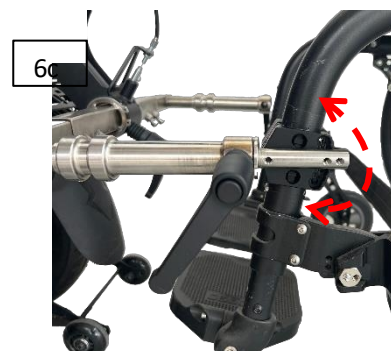




7. Controleer of de as van de conische pin evenwijdig is aan het grondvlak (fig. 7a) en steek dan de tweede schroef in het gat dat overeenkomt met de resulterende helling (fig. 7b). Let op: een kleine tolerantie van +/- 1 cm is toegestaan. **ATTENTIE** Als er geen paralleliteit is, is het beste compromis dat de punt iets naar beneden wijst.

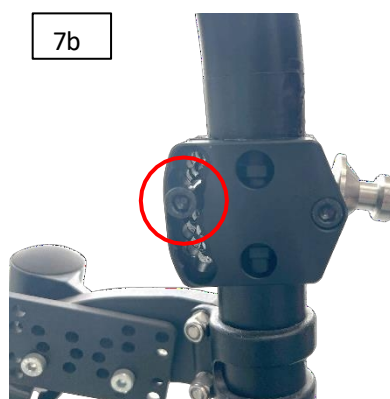

8. Schroef de laterale spanhendel los en controleer of de conische pen vrij in en uit de diepteregelaar komt door de stuwraak dichterbij en verder weg te bewegen.




9. Plaats de derde schroef in het gat tegenover de schroef (fig. 9a) en voeg de meegeleverde moer toe (fig. 9b). Als de tweede schroef in het middelste gat is geplaatst, plaats dan de derde schroef in het laatste onderste gat (Fig. 9c).

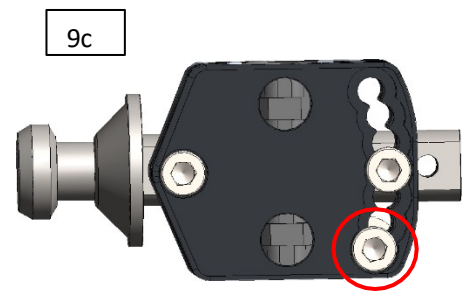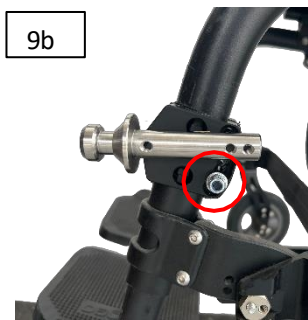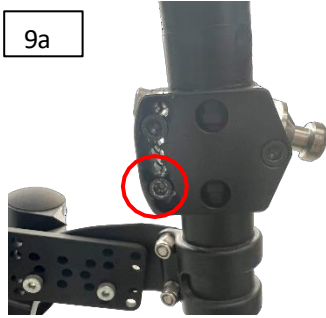

10. **ZIJDE 2** Voer de stappen vanaf nr. 4 uit voor de tegenoverliggende zijde.

ZIJDEN 1 e 2

11. Controleer of de breedte van de armen aan elke kant gelijk is. Draai vervolgens de asbouten vast met een aanhaalmoment van 12 Nm.

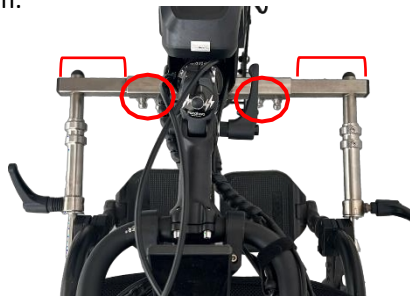

12. Schroef de spanhendels aan de zijkant los en controleer of beide conische pennen vrij in en uit de respectieve diepteregelaars komen door de stuwraket verder weg en dichterbij te bewegen. **Draai vervolgens de klemmschroeven met verzwaring vast (5-12 Nm), waarbij u erop let dat u de**



rolstoelslang niet beschadigt.

13. Indien nodig kunt u de afstand tussen de handgreep en de gebruiker aanpassen door de regelaar dicht of verder weg langs de arm te plaatsen en vervolgens vast te draaien met een aanhaalmoment van 12 Nm.

