


VERBINDINGSTYPE C

Deze aansluiting is geschikt voor de meeste rolstoelen met afneembare voetsteunen.

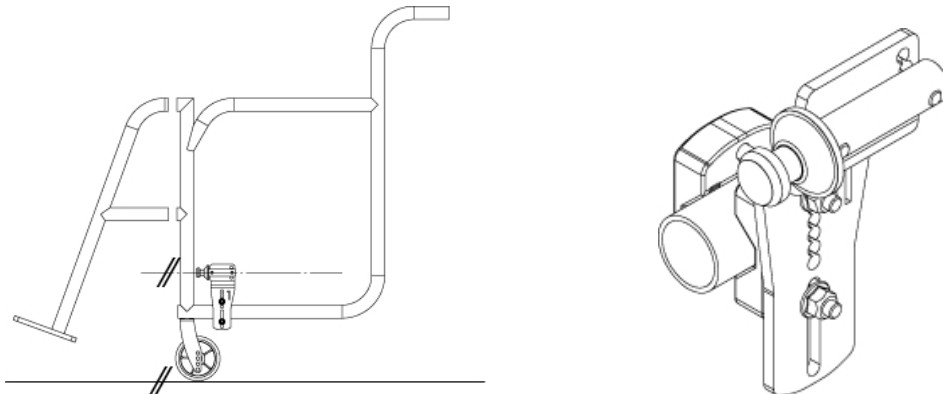

Hieronder staat een lijst met de meest voorkomende rolstoelen die compatibel zijn met de type C-aansluiting:


Progeo	Exelle Vario
	Basislicht
	Tekna Advance Swing
OffCarr	Alhena
	Ministar
	Vega
Ottobock	Avantgarde
	M2S starten
	Motus CV
Kushall	Compact
Moretti	Ardea Een
Vermeiren	D200V
	V500
	Trigo
	Jazz
Gialdi	Ultralicht
	Adaptief

Opmerking: de lijst wordt voortdurend bijgewerkt

TECHNISCHE ONDERSTEUNING: Eng. Alexander Troncone +39 3282177608

Geleverd materiaal

CODE	BEELD	BEDRAG	OPMERKINGEN
Universele klem 1012-26-007		2	
Universele klemadapters		2	De maat varieert afhankelijk van de vorm van de rolstoelbuis
Plaat N. 4 1012- 126-020		2	
Conische pin RTE-1006(56)		2	
Schroeven M6		6	De lengte varieert afhankelijk van de grootte van de rolstoelslang
Schroeven M6x20		4	
M6 zelfborgende flensmoeren		6	
Afdekkingen voor moeren		6	
Afstandhouders Inox 10mm		8	Alleen geleverd er interferentie is (zie pagina 5 Afb. 6c)

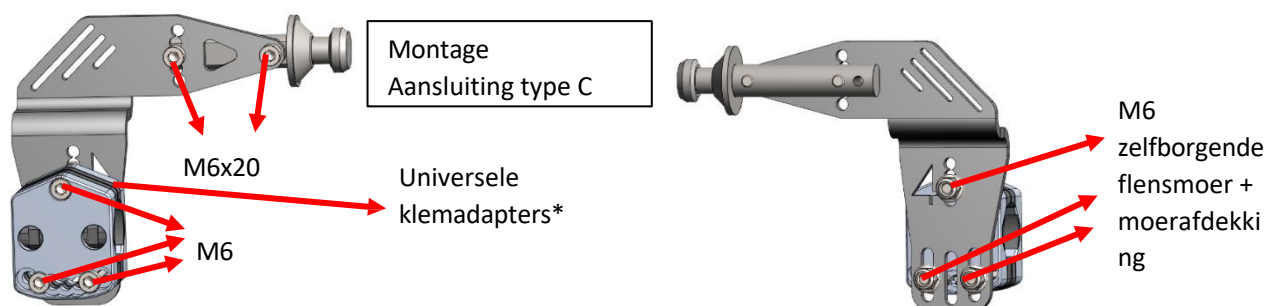


* Universele klemadapters kunnen worden gebruikt, behalve als er moeren of schroeven op het frame van de rolstoel zitten die storing kunnen veroorzaken




Montagehandleiding

	Wielmaat	Wapencode	Afbeelding	Conische pen-as installatiehoogte (H)	Type standaard	Foto
☐	EP3 12"/10"	Verhoogd L 1012-147-000		29^{+1}_{-1} cm	Intrekbare	
☐	EP3 14"/14,5"	Recht L 1012-128-000		29^{+1}_{-1} cm	Intrekbare	
☐	EP3 16"	Verlaagd L 1012-147-000		33^{+0}_{-1} cm	Intrekbare	


1. Voor een optimale configuratie: pas de helling van het stuur aan zodat het parallel loopt met het grondvlak

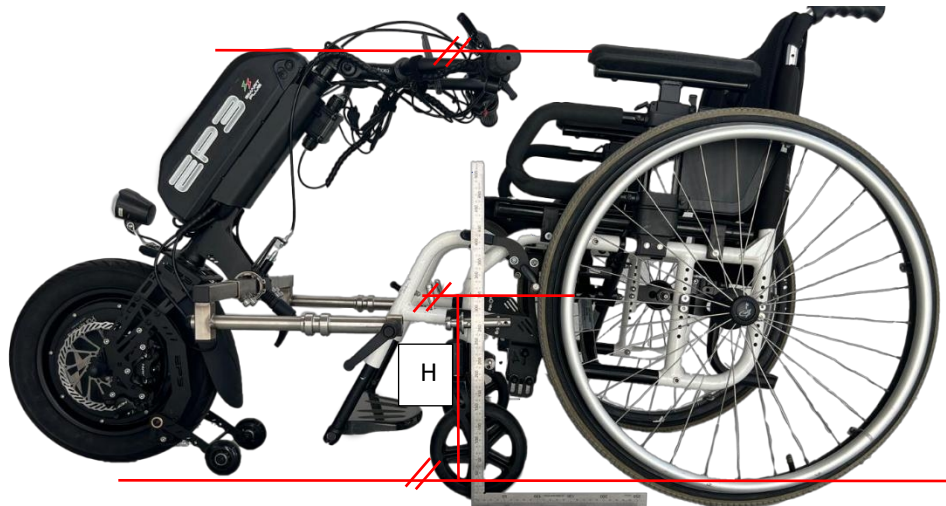

2. Stel de parkeerremmen van de rolstoel in en plaats de stuwraak voor de rolstoel met het wiel in het midden van de rolstoel.

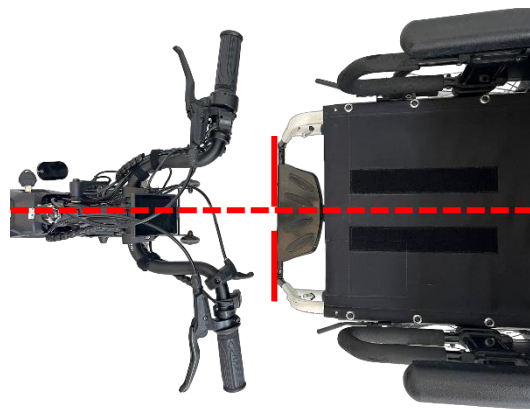


3. Plaats elke arm in de schacht, naar boven of naar beneden gericht, afhankelijk van het EP3 model, en pas de breedte van de armen tijdelijk aan de breedte van de rolstoel aan zonder de schroeven op de schacht vast te draaien.

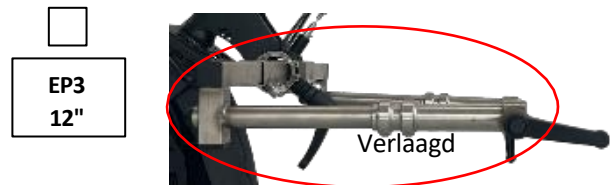

LET OP VOER DE VOLGENDE HANDELINGEN ÉÉN KANT TEGELIJK UIT

KANT 1

4. Monteer de conische pen vooraf op plaat nr. 4, waarbij u alleen de voorste schroef aanbrengt zodat de pen vrij kan hellen.

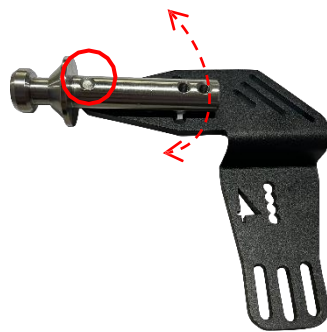


5. Plaats de universele klem met eventuele universele klemadapters op het punt van het frame dat is aangegeven in de afbeelding.




6. Monteer plaat nr. 4 op de klem door de schroeven nr. 3 (fig. 6a), één boven en de twee onderste in spiegelbeeld (fig. 6b), licht aan te draaien en het beste montagegat van plaat nr. 4 te kiezen zodat de punt van de conische pen zich op de hoogte H bevindt die in de vorige tabel is aangegeven; corrigeer de hoogte tolerantie H door de conische pen perfect af te stemmen op de diepteregelaar.

7.


Opmerking: Bij sommige rolstoelmodellen kan het nodig zijn om de plaat te kantelen (fig. 6c).

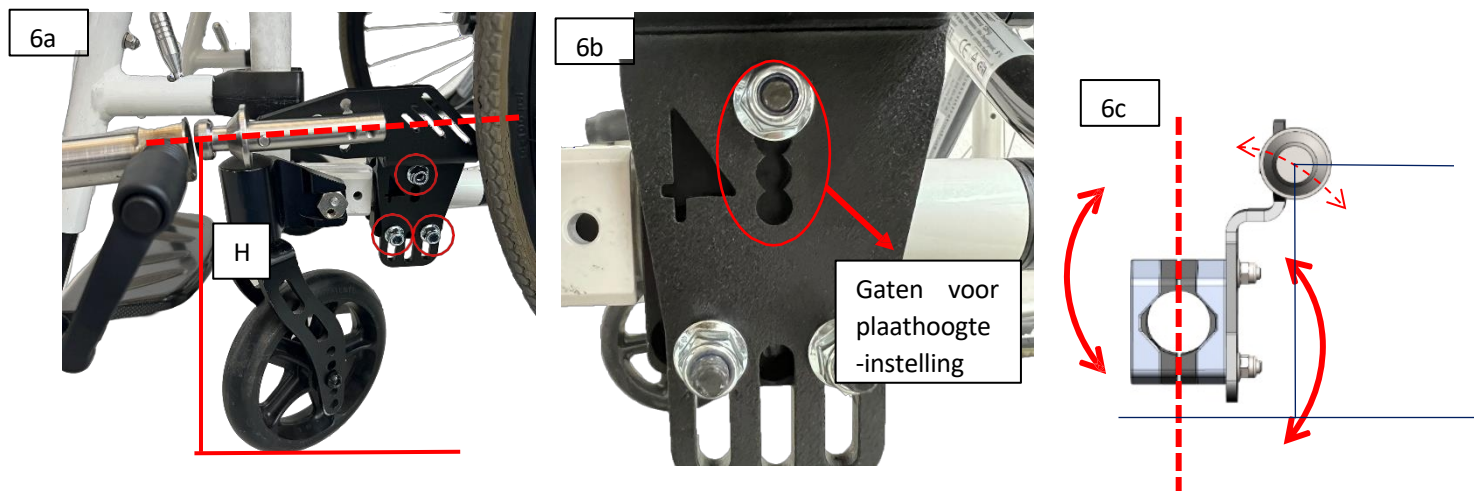

8. Steek de conische pen in de diepteregelaar en vergrendel deze enigszins door op de zijlemhendel te drukken (fig. 7a). Draai de borgschroeven van de armen op de as lichtjes aan (fig. 7b); door het aandraaien kantelen de armen lichtjes naar boven waardoor de conische pen zijn helling varieert en in de optimale positie komt te staan (fig. 7c).

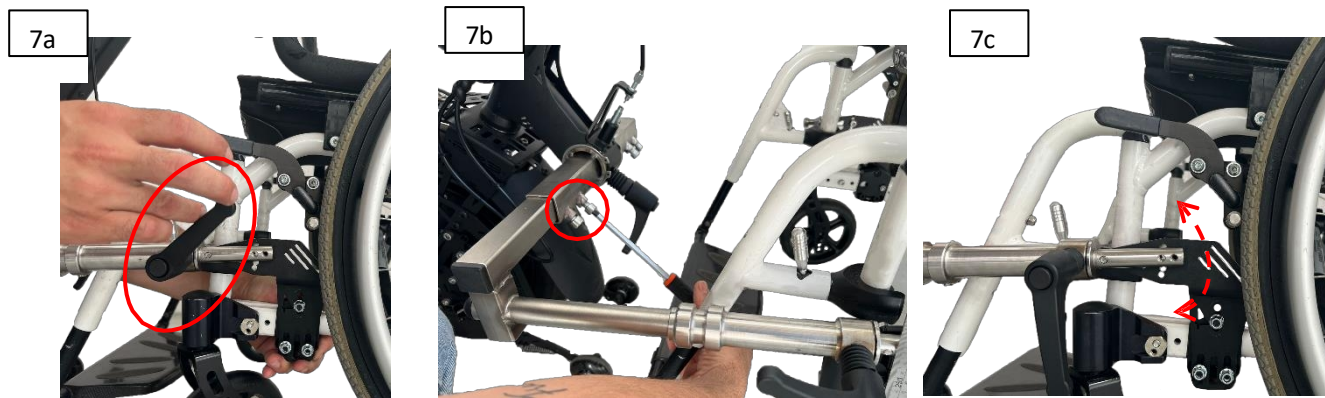

9. Controleer of de as van de conische pin evenwijdig is aan het grondvlak (Fig. 8a) en steek dan de tweede schroef in het gat dat overeenkomt met de resulterende helling (Fig. 8b). Let op: een kleine tolerantie van +/- 1 cm is toegestaan. **LET OP Bij gebrek aan evenwijdigheid is het beste compromis dat de punt iets naar beneden wijst.**

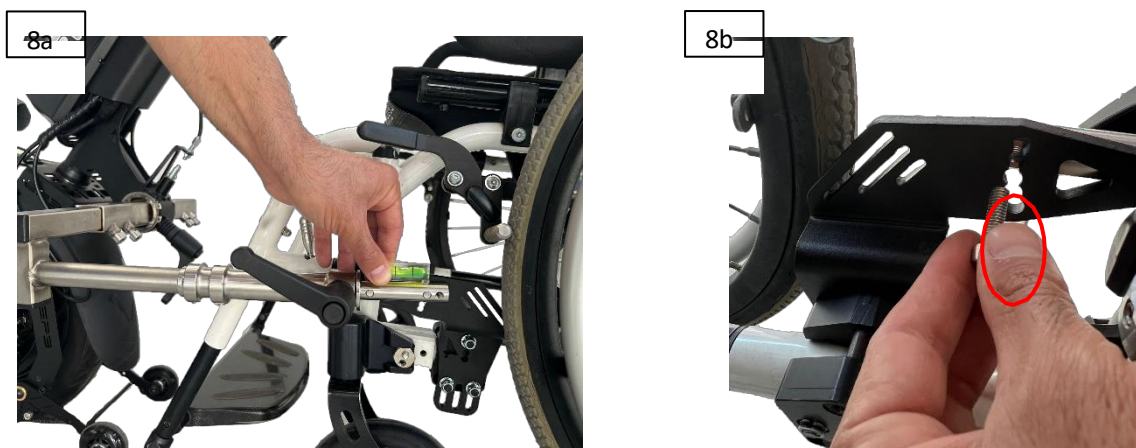


10. Schroef de laterale spanhendel los en controleer of de conische pen vrij in en uit de diepteregelaar gaat door de stuwraak dichterbij en verder weg te bewegen.



11. **ZIJDE 2** Voer de stappen vanaf nr. 4 uit voor de tegenoverliggende zijde.

ZIJDEN 1 e 2

12. Controleer of de breedte van de armen aan elke kant gelijk is. Draai vervolgens de asbouten vast met een aanhaalmoment van 12 Nm.

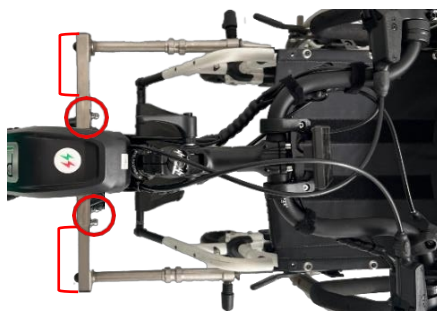

13. Schroef de spanhendels aan de zijkant los en controleer of beide conische pennen vrij in en uit de respectieve diepteregelaars komen door de stuwraak verder weg en dichterbij te bewegen. **Draai vervolgens de klemmschroeven met verzwaring vast (5-12 Nm), waarbij u erop let dat u de rolstoelslang niet beschadigt.**



14. Indien nodig kunt u de afstand tussen de handgreep en de gebruiker aanpassen door de regelaar dicht of verder weg langs de arm te plaatsen en vervolgens vast te draaien met een aanhaalmoment van 12 Nm.

